

## Consommables

Veillez consulter la Section 4 « Nettoyage et entretien » du manuel d'utilisation myAIRVO 2 pour en savoir plus sur les consommables. myAIRVO 2 comprend cinq éléments que vous devrez remplacer régulièrement pour conserver votre appareil aussi propre que possible. Le calendrier recommandé ci-après suppose que l'appareil myAIRVO 2 soit utilisé par une seule personne, et que les procédures de nettoyage appropriées soient respectées.



**30** **Interface nasale Optiflow™+**  
Remplacer tous les 30 jours.  
Référence produit : OPT942E (Petite)  
OPT944E (Moyenne)  
OPT946E (Grande)



**60** **Circuit respiratoire chauffant**  
Remplacer tous les 60 jours.  
Référence produit : 900PT560E



**60** **Chambre d'humidification à remplissage automatique MR290**  
Remplacer tous les 60 jours.  
Référence produit : 900PT290E



**60** **Poche à eau**  
Remplacer tous les 60 jours.  
Référence produit : 900PT401 (jeu de 2)



**90** **Filtre à air**  
Remplacer tous les 90 jours ou toutes les 1000 heures.  
Référence produit : 900PT913 (jeu de 2)



## Comprendre les boutons de myAIRVO 2

Veillez consulter la Section 3, « Utilisation de myAIRVO 2 », du manuel d'utilisation myAIRVO 2 pour en savoir plus sur le fonctionnement de votre appareil myAIRVO 2.



### Bouton marche/arrêt

Appuyez pendant 5 secondes sur le bouton marche/arrêt pour allumer l'appareil myAIRVO 2. Après utilisation, appuyez sur ce bouton pendant 3 secondes pour passer en mode séchage. Votre appareil s'éteint automatiquement après 99 minutes.



### Bouton Pause audio

Le bouton de pause vous permet de désactiver temporairement les alarmes sonores.



### Bouton mode

Le bouton mode permet de basculer entre les différents modes :

- Température
- Débit
- Jour/Nuit
- Observance



### Flèches haut et bas

Ces boutons permettent de modifier les paramètres des modes suivants :

- Température
- Débit
- Jour/Nuit


## Comprendre les modes de l'appareil myAIRVO 2 et les paramètres par défaut

Veillez consulter la Section 3, « Utilisation de myAIRVO 2 », du manuel d'utilisation myAIRVO 2 pour en savoir plus sur le fonctionnement de votre appareil myAIRVO 2. Votre appareil myAIRVO 2 garde en mémoire vos réglages lorsque l'appareil est hors tension.



### Mode Température

Utilisez les flèches haut et bas pour naviguer entre les températures : 31 °C, 34 °C et 37 °C.

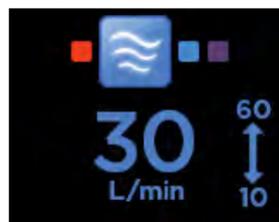

### Mode Débit

Utilisez les flèches haut et bas pour sélectionner le débit, de 10 à 60 L/min. Veillez consulter le manuel d'utilisation myAIRVO 2 pour en savoir plus sur les plages de débit pour votre interface.

**Remarque importante : Le présent document n'est qu'un Guide de démarrage rapide et ne remplace en aucune façon votre manuel d'utilisation myAIRVO 2. Avant d'utiliser votre appareil myAIRVO 2, vous devez lire le manuel d'utilisation myAIRVO 2 afin de comprendre l'usage prévu du dispositif, les mises en garde et les précautions. myAIRVO 2 n'est pas un support de vie.**

## Étapes de préparation de myAIRVO 2 avec la chambre d'humidification à remplissage automatique MR290


Veillez consulter la Section 2, « Réglage de myAIRVO 2 », et la Section 3, « Utilisation de myAIRVO 2 », de votre manuel d'utilisation myAIRVO 2 pour en savoir plus sur la préparation.

<p><b>1</b></p>	<p>Posez l'appareil myAIRVO 2 sur une table de chevet ou près du sol, à côté du lit. Vérifiez qu'il est placé plus bas que la hauteur de votre tête et est bien stable.</p>	<p><b>2</b></p>	<p>a. Retirez les bouchons bleus et la protection autour de la tubulure d'alimentation en eau. b. Installez l'adaptateur coudé fourni sur la chambre d'humidification MR290. c. Clippez le tube d'alimentation en eau.</p>
<p><b>3</b></p>	<p>Appuyez sur le protège-doigts et mettez en place la chambre d'humidification sur votre appareil en l'enfonçant jusqu'à entendre un clic.</p>	<p><b>4</b></p>	<p>a. Accrochez la poche à eau sur le support prévu à cet effet. b. Enfoncez le raccord du tube d'alimentation en eau dans le connecteur situé en bas de la poche à eau. Ouvrez le bouchon de la tubulure. c. L'eau s'écoule dans la chambre d'humidification MR290 et le niveau d'eau se situe sous le repère de remplissage maximal.</p>
<p><b>5</b></p>	<p>Connectez le circuit respiratoire chauffant à l'appareil myAIRVO 2.</p>	<p><b>6</b></p>	<p>Branchez le cordon d'alimentation myAIRVO 2 sur une prise secteur et à l'arrière de l'appareil.</p>
<p><b>7</b></p>	<p>Allumez l'appareil myAIRVO 2 en appuyant sur le bouton marche/arrêt pendant 5 secondes.</p>	<p><b>8</b></p>	<p>myAIRVO 2 commence à chauffer, et l'écran affiche un symbole invitant à patienter.</p>
<p><b>9</b></p>	<p>Quand myAIRVO 2 est prêt à être utilisé, un symbole de confirmation s'affiche.</p>	<p><b>10</b></p>	<p>Vous pouvez alors brancher votre interface et débiter le traitement. Au cours de l'utilisation, si un condensat se forme en grande quantité dans le tube, reportez-vous au paragraphe Gestion du condensat, à la Section 2, « Réglage de myAIRVO 2 ».</p>

## Nettoyer myAIRVO 2

Veillez consulter la *Section 3, « Utilisation de myAIRVO 2 »*, et la *Section 4, « Nettoyage et entretien »*, de votre manuel d'utilisation myAIRVO 2 pour en savoir plus sur le nettoyage de l'appareil myAIRVO 2.

### Nettoyage quotidien

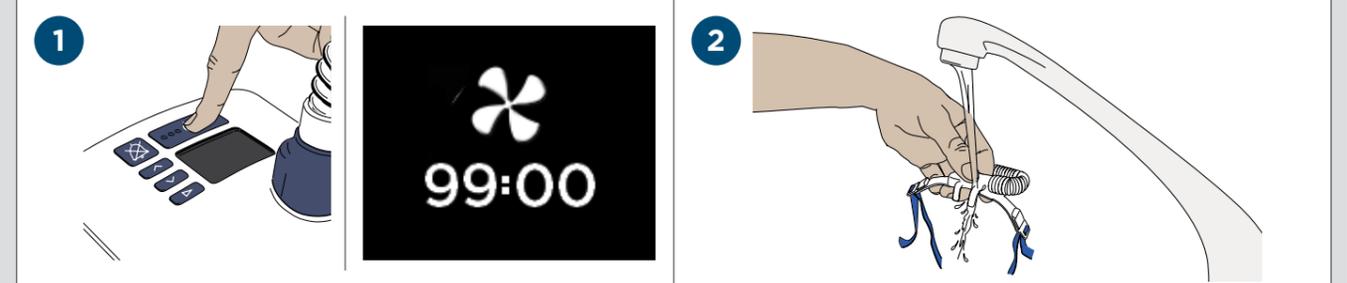

1 Après utilisation, retirez votre interface. Pour lancer le mode séchage pendant 99 minutes, maintenez le bouton marche/arrêt enfoncé pendant 3 secondes. Pour éviter les brûlures, ne soulevez pas l'interface pendant le séchage et ne retirez pas la chambre d'humidification jusqu'à la fin du séchage.

2 Rincez l'interface à l'eau potable, puis rebranchez-la au circuit respiratoire chauffant alors que le mode séchage est encore actif, pour sécher l'interface.


### Nettoyage hebdomadaire



1 Éteindre l'appareil et débrancher la prise d'alimentation secteur.

2 Ôter le circuit respiratoire chauffant et purger l'excès de condensat.

3 Déconnecter l'interface du circuit respiratoire chauffant, laver à l'eau chaude et au liquide vaisselle doux, rincer à l'eau potable puis rebrancher au circuit respiratoire chauffant.

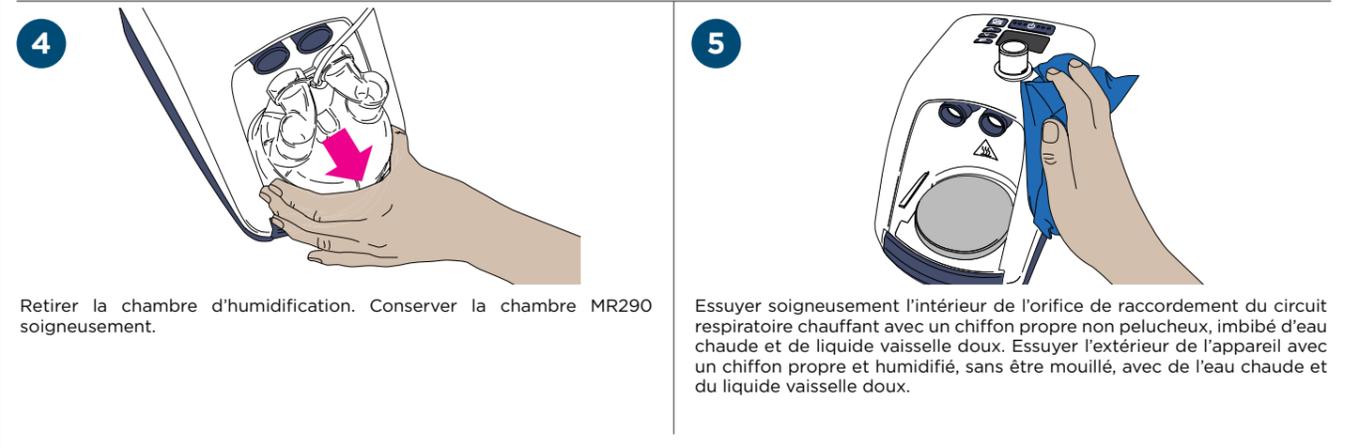



4 Retirer la chambre d'humidification. Conserver la chambre MR290 soigneusement.

5 Essuyer soigneusement l'intérieur de l'orifice de raccordement du circuit respiratoire chauffant avec un chiffon propre non pelucheux, imbibé d'eau chaude et de liquide vaisselle doux. Essuyer l'extérieur de l'appareil avec un chiffon propre et humidifié, sans être mouillé, avec de l'eau chaude et du liquide vaisselle doux.

## Alarmes visuelles et sonores de myAIRVO 2

Veillez consulter la *Section 3, « Utilisation de myAIRVO 2 »*, du manuel d'utilisation myAIRVO 2 pour en savoir plus sur les alarmes. L'appareil myAIRVO 2 est équipé d'alarmes pour vous avertir en cas d'interruption de votre traitement. Vous pouvez utiliser le bouton Pause audio pour arrêter l'alarme pendant 115 secondes.

### Bouton Pause audio

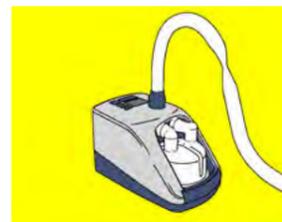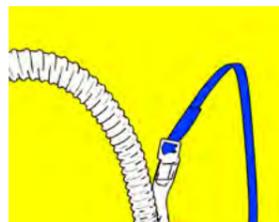

Une fois le nettoyage terminé, préparer myAIRVO 2 en utilisant les étapes de configuration décrites précédemment.