

**Montage à utiliser pour une machine niveau 1 -2  
simple branche à fuite  
(privilégier niveau 2 pour possibilité  
d'ajouter O2 sur la machine)**



Si fuite déporté « commerciale » non disponible, possibilité de produire une fuite sur un raccord simple ou coudé.  
Faire un orifice sur le raccord de 5 mm faite avec biopsie punch (les dermatos ont cela)

Fuite calculée à 30-40 l/min à 10 cm H2O en banc test

Claudio Rabec, Marjolaine Georges  
Service de Pneumologie  
et Soins Intensifs Respiratoires