


## RESPIRATEUR DE NIVEAU 2 (avec batterie externe) **BIPAP A30 ou A40 (PHILIPS RESPIRONICS)** **MONTAGE ET NETTOYAGE**

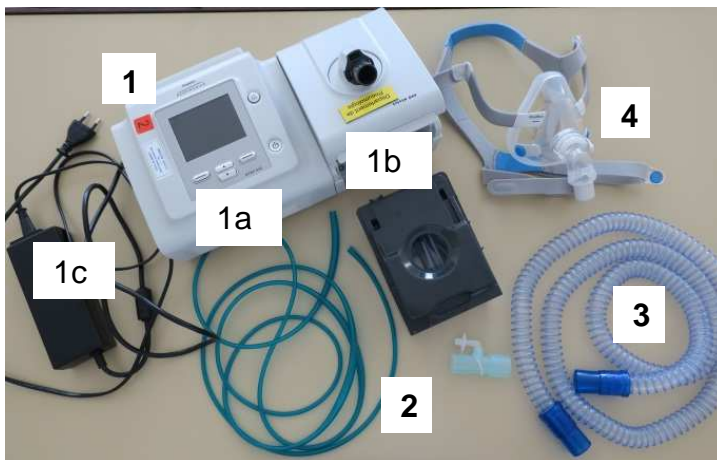

### **Matériel nécessaire :**

- 1) Respirateur + chambre d'humidification amovible + alimentation électrique :
  - a. Bloc moteur
  - b. Bloc humidificateur + Chambre d'humidification amovible
  - c. Alimentation électrique
- 2) Raccord à O<sub>2</sub> + Argyl vert®
- 3) Tuyau pour circuits respiratoires Rüşh® (bleu) (monobranche)
- 4) Masque à fuite intentionnelle
- 5) Eau stérile




## Montage du respirateur :

Le respirateur est composé de deux blocs joints :



### *a) Circuit et interface*

Seulement le tuyau pour circuits respiratoires Rüş® (bleu) doit être utilisé. Il se fixe au-dessus du bloc humidificateur avec un raccord à O<sub>2</sub> et un tuyau d'argyl® vert si besoin d'apport en O<sub>2</sub>.

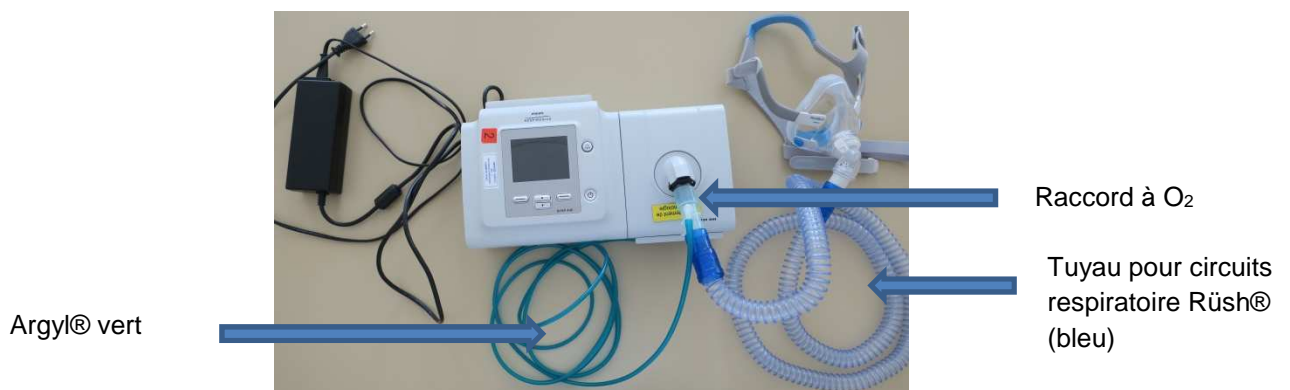

Un masque à fuite intentionnelle est utilisé avec ce type de respirateur.

### *b) Chambre d'humidification*

La chambre d'humidification doit être remplie d'eau stérile jusqu'au niveau maximum.

Pour désadapter l'humidificateur, du bloc moteur, saisir l'encoche et l'enlever :



Encoche à saisir

*c) Batterie externe*

Il y a la possibilité de mettre une batterie externe (patient qui ventile pendant ses déplacements, pendant un examen)



Batterie externe



Pour la retirer, saisir l'encoche et désadapter celle ci

**Nettoyage du respirateur :**

**Parties à usage unique :** tuyaux pour circuits respiratoires Rüşh® (bleu), le raccord à O<sub>2</sub>, l'argyl® vert.

**Parties à décontaminer :**



# CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE

## DEPARTEMENT DE PNEUMOLOGIE

*Dr R. BARTHES - Dr J. SOLER – C. MARTIN – S. LOPPINET – Pr F. CHABOT*

*Version 2 - Mai 2020*

- Le masque (cf protocole de nettoyage et de désinfection des masques)
- Le respirateur :
  - Nettoyer avec une lavette et un produit détergent-désinfectant Aniosurf® la surface du respirateur et le câble électrique.
  - Sortir la chambre d'humidification et la faire tremper dans une solution d'AniosClean®. Rincer et laisser sécher à l'air libre.
  -

### **QR code pour vidéo explicative :**

